

LÖWENSTEIN
medical

JOYCEeasy

Tout simplement génial. Génial, tout simplement.

 With people in mind

JOYCEeasy. Génial, tout simplement.

Nasal ou Full Face. Tout simplement facile.

Vos patients ont besoin d'un masque avec une cale frontale bien fixée ? Découvrez notre famille JOYCEeasy. Avantage : après avoir trouvé l'écartement adéquat, l'arête du nez est soulagée durablement sans qu'un ajustement ultérieur ne soit nécessaire.

Les masques disponibles dans trois tailles convainquent depuis de nombreuses années grâce à leur étanchéité et leur ajustement fiables.

L'optimisation des plus petits détails dans la jupe du masque a permis d'améliorer davantage le confort.

Le bruit d'écoulement agréablement faible, la liberté de mouvement grâce à la rotule articulée et la manipulation simple pour le nettoyage sont restés inchangés.

Une simplicité géniale sous tous les angles :

- Liberté de mouvement illimitée grâce à la rotule articulée **1**
- Système expiratoire très silencieux **2**
- Code couleur des bandes auto-agrippantes **3**
- Plastique extrêmement robuste
- Sangle d'ouverture (Full Face uniquement)




JOYCEeasy

Vos commentaires ont permis de continuer d'optimiser le masque nasal.

Une zone large, douce et profonde prévue pour l'arête du nez permet même aux grands nez de s'immerger facilement et confortablement dans le coussin. La zone des lèvres supérieures est plus plate et plus flexible, le masque épouse encore mieux les formes du visage.

En augmentant la taille de la jupe du masque, un plus grand nombre de patients peut désormais profiter de ces améliorations. Pas d'inquiétude, la jupe de taille S, dont la taille n'a pas changé, continuera à s'adapter aux petits visages.

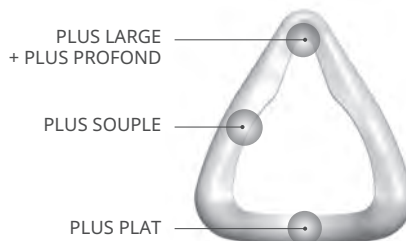

JOYCEeasy

JOYCEeasy Full Face JOYCEeasy next Full Face

Le duo idéal. L'ajustement parfait pour chacun.

L'extension de notre catalogue JOYCEeasy-Full-Face a fait ses preuves. La principale différence se situe au niveau de la jupe du masque.

JOYCEeasy Full Face s'adapte particulièrement aux visages minces et aux plus amaigris, tandis que JOYCEeasy next Full Face est plutôt destiné aux visages normaux à adipeux.

Le harnais stable joue aussi un rôle précieux avec JOYCEeasy next Full Face.



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

PLUS LARGE
pour un confort maximal et
stable sous pression
jusqu'à 40 mbar



PLUS PROFOND
pour une tenue plus
flexible, plus souple
et plus longue de 4 mm



PLUS PLAT
pour une tenue plus flexible
et plus souple



JOYCEeasy next Full Face
Pour les visages normaux à
adipeux

JOYCEeasy Full Face
Pour les visages minces
aux plus amaigris



Pièces de rechange/accessoires

Harnais

WEINMANNstrap pour
JOYCEeasy
clips pour harnais compris
WM 25505

WEINMANNstrap pour
JOYCEeasy Full Face
clips pour harnais compris
WM 25606

WEINMANNstrap pour
JOYCEeasy next Full Face
clips pour harnais compris
WM 25105

Coussinet frontal
silicone
WM 26801



Jupe du masque

silicone
taille S WM 26803 (nasal)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next Full Face)
taille M WM 26813 (nasal)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next Full Face)
taille L WM 26823 (nasal)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next Full Face)

Kit raccord coudé

JOYCEeasy next Full Face NV
JOYCEeasy Full Face NV
anneau de sécurité NV,
raccord coudé NV
WM 25275

Kit adaptateur endoscopique

JOYCEeasy next Full Face NV
JOYCEeasy Full Face NV
anneau de sécurité NV,
raccord coudé NV
WM 15864



Kit rotule articulée

JOYCEeasy à fuite
anneau de sécurité, raccord coudé,
douille rotative
WM 15798

JOYCEeasy next Full Face à fuite
anneau de sécurité,
raccord coudé, douille rotative,
valve anti-asphyxie
WM 15944

JOYCEeasy Full Face à fuite
anneau de sécurité,
raccord coudé, douille rotative,
valve anti-asphyxie
WM 15897

Sangle d'ouverture
déverrouillage rapide
WM 26890



Vous trouverez de plus amples informations concernant nos solutions de traitement, nos accessoires et nos systèmes de masque sur loewensteinmedical.com

Caractéristiques techniques

	JOYCEeasy next Full Face JOYCEeasy Full Face	JOYCEeasy		JOYCEeasy next Full Face JOYCEeasy Full Face	JOYCEeasy
Classe du produit conforme MDR (EU) 2017/745	II a	II a	Résistance à l'écoulement à fuite • à 50 l/min • à 100 l/min	0,3 hPa ± 0,1 hPa 0,7 hPa ± 0,1 hPa	0,3 hPa 1,0 hPa
Dimensions (l x h x p)	90 x 145 x 101 mm (Taille S) 90 x 155 x 101 mm (Taille M) 96 x 170 x 105 mm (Taille L)	100 x 100 x 80 mm (Taille S) 105 x 110 x 80 mm (Taille M) 110 x 120 x 80 mm (Taille L)	Résistance à l'écoulement sans fuite • à 50 l/min • à 100 l/min	0,03 hPa ± 0,1 hPa 0,1 hPa ± 0,1 hPa	-
Poids	120 g (Taille S) 126 g (Taille M) 134 g (Taille L)	94 g (Taille S) 97 g (Taille M) 98 g (Taille L)	Résistance à l'écoulement valve expiratoire d'urgence (à fuite uniquement) • Inspiration à 50 l/min • Expiration à 50 l/min	0,6 hPa ± 0,2 hPa 0,8 hPa ± 0,2 hPa	-
Espace mort	180 ml (Taille S) 210 ml (Taille M) 270 ml (Taille L)	100 ml (Taille S) 105 ml (Taille M) 115 ml (Taille L)	Niveau de pression acous- tique, valve d'expiration d'urgence • Ouverte : • Fermée :	≤ 1,0 hPa < 4,0 hPa	-
Pression thérapeutique	4 hPa – 30 hPa (JOYCEeasy Full Face) 4 hPa – 40 hPa (JOYCEeasy next Full Face)	4 hPa – 30 hPa	Valeurs d'émission sonores déclarées combinées selon la norme ISO 4871 : • Niveau de pression acoustique : • Niveau de puissance acoustique : • Incertitude de mesure :	13 dB(A) 21 dB(A) 3 dB(A)	17 dB(A) 25 dB(A) 3 dB(A)
Raccord pour tuyau conique conforme à EN ISO 5356-1	à fuite Ø 22 mm (mâle) sans fuite Ø 22 mm (femelle)	Ø 22 mm (mâle)	Durée de vie	5 ans	5 ans
Plage de température • Fonctionnement : • Transport et stockage :	+5 °C à +40 °C -20 °C à +70 °C	+5 °C à +40 °C -20 °C à +70 °C	Durée d'utilisation	Jusqu'à 12 mois ¹	Jusqu'à 12 mois ¹
			Normes appliquées	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

¹ Les matériaux utilisés pour la fabrication des masques se détériorent, par exemple, lorsqu'ils sont soumis à des détergents agressifs. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de remplacer certaines pièces du masque de manière anticipée.

Désignation de l'appareil	Taille S	Taille M	Taille L
JOYCEeasy	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930
JOYCEeasy next Full Face	WM 25109	WM 25119	WM 25129
JOYCEeasy next Full Face NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179

CE 0197

Mentions légales

Dénomination : Masque JOYCEeasy

Indications : Masque destiné à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile ou par plusieurs patients en milieu médical.

Classe du dispositif médical : IIa

Organisme notificateur : TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Germany

Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif

Remboursement : Pris en charge dans le cadre de prestation de soin à domicile ou

en milieu hospitalier : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr

Fabricant : Löwenstein Medical Technology - Allemagne, Distributeur : Löwenstein Médical France

Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.

© Protégé par le droit d'auteur. Toute forme de reproduction est soumise à l'autorisation expresse préalable de Löwenstein Medical. Pour des raisons techniques d'impression, toutes les indications sont fournies sans garantie.



Made in
Germany
Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Allemagne

Maison mère
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical Schweiz
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof, Suisse
T. +56 41641-11
F. +56 41641-21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.com

Ventes + Service
Löwenstein Medical France
6, Rue de l'Aulnay-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 1693553-20
france@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

